

AMI

Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegellových svalů nebo také PC svalů).

Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem.

Ami je potěšení: cvičení se pro Vás stane zábavou díky malému, skrytému závaží, které se při sebemenším pohybu příjemně chvěje.

Ami je opravdová kamarádka: pomůže Vám jednodušeji dosáhnout intenzivnějších orgasmů a umožní celkově větší kontrolu nad svaly pánevního dna.

Proč používat Ami?

Potěšení pro Vás: Pravidelné používání Ami posílí a zpevní svaly pánevního dna, zvýší tak jejich citlivost a napomůže k jednoduššímu dosažení intenzivnějších orgasmů. Ami v sobě skrývá malá závaží, která se při každém pohybu příjemně chvějí. Zároveň je ale velice diskrétní, a tak si můžete zpříjemnit každou chvíli – nejen když jste doma, ale například i v práci nebo na služební cestě.

Potěšení pro něj: Dopřejte svému partnerovi nové, nezapomenutelné, milostné zážitky. Posílené svaly pánevního dna využijete při milování pro dráždění a silnější sevření jeho penisu.

Vaše zdraví: Mnoho z nás o tomto problému nerado hovoří, ale fakt je, že mnoho žen v určitém období života trpí nechtěnou inkontinencí. S Ami však posílíte svaly pánevního dna a zároveň tak získáte větší kontrolu nad močovým měchýřem.

Těhotenství: Používání Ami před početím může ochránit pochvu tím, že posiluje PC svaly a připravuje je tak na samotný porod. Po porodu zase urychlí znovudosažení jejich

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, JE JOUE a TENGA pro ČR a SR

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

pevnosti a přispěje k celkové rekonvalescenci poševních svalů. Větší síla, kterou Vaše PC svaly získají, je příslibem příjemných milostných zážitků pro Vás i Vašeho partnera.

Menopauza: Posilování svalů pánevního dna přispívá k přirozenému poševnímu zvlhčování, sexuální vzrušivosti a zabraňuje nechtěné inkontinenci v průběhu menopausy.

Svaly pánevního dna

Sval pubococcygeus (PC sval) podobající se houpací síti se rozpíná od stydké kosti ke kostrči a podpírá pánevní a vnitřní pohlavní orgány. Silný PC sval je klíčem k intenzivním orgasmům, k vyšší kontrole nad močovým měchýřem a zároveň pomáhá při porodu.

Kegelovy cviky

Kegelovy cviky (pojmenované po americkém gynekologovi, Dr. Kegelovi, který je v 70. letech 20. století proslavil) jsou navrženy tak, aby posilovaly a zpevňovaly PC sval. S Ami jsou tyto cviky výrazně jednodušší a velice příjemné.

Ami třikrát jinak

Ami není pouze jedna pomůcka pro praktikování Kegelových cviků. Jsou hned tři – a vytvářejí tak jedinečný způsob posilování pánevního dna. Tato soukromá posilovací sada v sobě nese to nejlepší z lékařských a erotických pomůcek na trhu a je mnohem příjemnější a zábavnější než skutečná posilovna.

Ami 1: Velká, měkká samostatná kulička s lehkým závažím. Pokud jste začátečnice v oblasti Kegelových cviků nebo už jste dlouho PC svaly neprocvičovala, doporučujeme začít právě s Ami číslo 1.

Ami 2: Dvě kuličky střední velikosti s jemným, měkkým povrchem, jen o něco málo těžší. Vyzkoušejte cvičení s Ami 2 pokud je to pro Vás s Ami 1 příliš jednoduché.

Ami 3: Dvě malé kuličky s tvrdým povrchem a těžkým závažím – pro pokročilé uživatelky.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA pro ČR a SR

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


J E J O U E

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

Jak Ami používat

Nejdříve zjistěte kde se Váš Pc sval nachází. Najdete ho jednoduše, např. při močení - když zkusíte zastavit proud moči. Sval, který přitom používáte je právě PC sval.

Nyní si vyberte nejvhodnější Ami. Začátečnice by měly začít s Ami 1 a postupně připravovat a vypracovat svaly k užívání Ami 2 a Ami 3. Než začnete, nejdříve naneste na povrch Ami dostatečné množství lubrikačního gelu, založeného na bázi vody.

Existuje opravdu mnoho Kegelových cviků, z nichž Vám některé mohou vyhovovat více než jiné. Vyzkoušejte nejoblíbenější z nich, uvedené pod tímto textem, nebo experimentujte a vyzkoušejte úplně jiné techniky – např. vezměte si Ami, když jste doma a užívejte si příjemné chvění, které vydávají jednotlivá závaží.

Cvičení 1: Něco jednoduchého

Lehněte si pohodlně na záda na postel nebo podlahu a zasuňte Ami. Sevřete Ami PC svalem na pět sekund, poté na dvě sekundy povolte. Tento postup opakujte desetkrát.

Nyní si dejte minutovou přestávku a opět celý proces zopakujte. Před třetí sérií si dejte dvouminutovou pauzu.

Tuto sestavu cvičte každý den. Až to pro Vás začne být příliš jednoduché, vyzkoušejte tři série po patnácti stlačeních (místo 10).

Cvičení 2: Pro pokročilejší

Sedněte si na kraj postele nebo židle a zasuňte Ami. Zatněte PC sval a opatrně 5 sekund táhněte za šňůrku, jako kdybyste chtěla Ami vytáhnout ven. Potom si pět sekund odpočiňte. Tento proces zopakujte desetkrát.

Nyní si dejte minutovou přestávku a opět celý proces zopakujte. Před třetí sérií si dejte dvouminutovou pauzu.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA pro ČR a SR

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

Tuto sestavu cvičte každý den. Až to pro Vás začne být jednoduché, vyzkoušejte tři série po patnácti stlačeních (místo 10).

Specifikace

Materiál: 100% zdravotně nezávadný silikon a polykarbonát

Váha:

Ami 1 – 47g

Ami 2 – 78 g

Ami 3 – 106 g

Délka zahrnující provázek:

Ami 1 – 111 mm

Ami 2 – 156 mm

Ami 3 – 144 mm

Délka bez provázku:

Ami 1 – 36 mm

Ami 2 – 80 mm

Ami 3 – 70 mm

Maximální průměr:

Ami 1 – 36 mm

Ami 2 – 32 mm

Ami 3 – 28 mm

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA pro ČR a SR

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

Lubrikační gel: Doporučuje se používat pouze lubrikační gely založené na bázi vody.

Čištění: Doporučuje se mýt Ami vlažnou vodou a dezinfekčním mýdlem. Pokud chcete Ami vyčistit pomocí vyvaření, doporučujeme Ami vařit maximálně 1-2 minuty, aby se zachovala její životnost.

Upozornění: Ami není lékařská pomůcka. Informace v tomto textu ani samotný výrobek nebyl vyzkoušen, schálen ani ohodnocen FDA. Tento produkt není navržen k diagnostikování, léčbě nebo prevenci proti chorobám.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA pro ČR a SR

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY

www.FunToys.cz


J E J O U E

www.JeJoue.cz

LELO
PLEASURE OBJECTS

www.LELOdesign.cz

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.Tenga.cz